

pH-Fix 3,6 – 6,1

Languettes test pour détermination du pH entre 3,6 et 6,1



Respecter les instructions d'utilisation

REF 92130.FR

Contenu :

100 languettes test
1 échelle de couleurs pH 3,6 – 6,1

Application :

Les languettes test pH-Fix 3,6 – 6,1 sont des languettes indicatrices qui peuvent être utilisées pour de nombreuses applications.

Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

Mode d'emploi :

1. Plonger une languette dans l'échantillon pendant 1 seconde en veillant à ce que la zone réactive soit recouverte.
2. Sortir la languette et la secouer pour éliminer l'excédent d'échantillon.
3. Comparer la couleur de la zone réactive avec l'échelle de couleurs. Lire la valeur.



NB :

Si la solution n'est pas suffisamment tamponnée, laisser la languette dans l'échantillon et attendre que les couleurs se soient stabilisées.

Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

Élimination :

Les languettes usagées peuvent être jetées à la poubelle.



Respecter les instructions d'utilisation



Limites de température



À utiliser avant



Numéro de lot



Référence produit



Fabricant



Ne pas réutiliser



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne

Tél. : + 49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Commercialisé en France par : MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720

Hoerd · France

Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

Commercialisé en Suisse par : MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse

Tél. : 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

pH-Fix 3,6 – 6,1

Languettes test pour détermination du pH des sécrétions vaginales entre 3,6 et 6,1



IVD Uniquement pour les professionnels de santé

i Respecter les instructions d'utilisation

REF 92130.FR

Contenu :

100 languettes test
1 échelle de couleurs pH 3,6–6,1

Application :


Les languettes test pH-Fix 3,6–6,1 sont des languettes indicatrices pour la détermination semi-quantitative du pH vaginal.

NB : Uniquement pour les professionnels de santé. Pour l'interprétation, demander l'avis de spécialistes médicaux.

Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

Mode d'emploi pour la détermination du pH des sécrétions vaginales :

1. Prélever l'échantillon avec un gant. Mouiller la zone réactive avec l'échantillon de sécrétions vaginales jusqu'à ce que la couleur ne change plus.
2. Comparer la couleur de la zone réactive avec l'échelle de couleurs. Lire la valeur (précision de lecture : 0,1 unité de pH). Les échantillons fortement colorés faussent le résultat et ne doivent pas être utilisés.

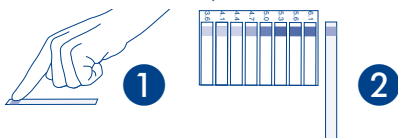

Performances :

Une étude comparative (n = 26) a mis en évidence un écart moyen de 0,1 unité de pH entre les languettes test et la méthode de référence (électrode de pH).

Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

Élimination :

Les languettes usagées peuvent contenir des matières infectieuses. Les éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur concernant l'élimination des déchets.



Déclaration de conformité (le produit est conforme à la directive européenne 98/79/CE sur le diagnostic in vitro)



Diagnostic *in vitro*



Respecter les instructions d'utilisation



Limites de température



À utiliser avant



Numéro de lot



Référence produit



Fabricant



Ne pas réutiliser



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennér Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne

Tél. : + 49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Commercialisé en France par : **MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France

Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

Commercialisé en Suisse par : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse

Tél. : 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com