

Kurzanleitung

Wichtige Informationen:

Diese separate Kurzanleitung wird zusammen mit dem URYXXON® Relax ausgeliefert. Die Kurzanleitung ist nicht als umfassendes Handbuch gedacht. Weitere Informationen, einschließlich detaillierter Betriebs- und Reinigungs- / Desinfektionsverfahren, finden Sie im vollständigen Gerätehandbuch.

MACHEREY-NAGEL Teststreifen auf dem URYXXON® Relax

Das URYXXON® Relax ist ein Reflexionsphotometer zur Auswertung von Harnteststreifen. Es ist für die In-vitro-Diagnostik (IVD) bestimmt und darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden. Besprechen Sie jedes positive Ergebnis mit einem Arzt. Bei anhaltenden Symptomen die Messung wiederholen.

Verwenden Sie nur MACHEREY-NAGEL Harnteststreifen, die für die instrumentelle Auswertung geeignet sind.

Testen Sie frischen Harn innerhalb von 2 Stunden. Tiefgekühlter Harn muss vor dem Test auf Raumtemperatur gebracht werden (15–30 °C).

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig, bevor Sie den Test durchführen und befolgen Sie die Anweisungen.



Schritt 1:


Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Streifenhalter sauber ist.



Schritt 2:


Tauchen Sie den Streifen in die Harnprobe ein. Stellen Sie sicher, dass alle Testfelder benetzt werden.

Entfernen Sie den Teststreifen nach ca. 1 Sekunde aus der Harnprobe. Streifen Sie die seitliche Kante des Teststreifens am Gefäßrand ab, um überschüssigen Harn zu beseitigen.

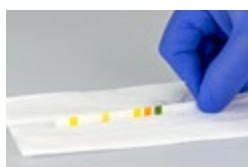

Schritt 3:

Tupfen Sie die seitliche Kante des Teststreifens auf ein saugfähiges Tuch (ca. 1 Sekunde), um überschüssigen Harn zu entfernen.

 Stellen Sie sicher, dass überschüssiger Harn vom Teststreifen entfernt wurde, um eine Verschleppung in das Gerät zu vermeiden.



Schritt 4:

Legen Sie den Teststreifen auf den Streifenhalter. Die Testfelder müssen nach oben zeigen. Schieben Sie den Teststreifen bis zum Ende des Streifenhalters.

Das Gerät startet die Messung automatisch.



Schritt 5:

Nach Abschluss der Messung wird das Ergebnis automatisch gedruckt.



Schritt 6:

Entsorgen Sie den benutzten Teststreifen zusammen mit den Laborabfällen. Wischen Sie Probenreste vom Streifenhalter ab.

Reinigung



1. Wischen Sie das Gerät von außen mit einem Desinfektionstuch ab.

2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Streifenhalter heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.

3. Wischen Sie den Streifenhalter mit einem Desinfektionstuch ab. Schieben Sie den Streifenhalter wieder zurück in das Gerät.

4. Drücken Sie den Streifenhalter mit angemessener Kraft vollständig auf den Metallstreifen.

5. Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes täglich mit einem Desinfektionstuch. Verwenden Sie geeignete Desinfektionstücher.

Einzelheiten zur Reinigung und Wartung finden Sie im vollständigen Handbuch.



Qualitätskontrolle

Jede Einrichtung muss ihre eigene QC-Richtlinie implementieren.

Die Leistung der Teststreifen sollte durch die Verwendung von Positiv- und Negativkontrolllösungen bestätigt werden. Positiv- und Negativkontrollen sollten einmal täglich, bei Anbruch einer neuen Streifenpackung, bei Verwendung einer neuen Charge und alle 30 Tage analysiert werden, um die Lagerbedingungen zu überprüfen.

Wechseln des Druckerpapiers



1. Drücken Sie den Knopf neben dem Schlitz für das Druckerpapier, um den Papierschlitz zu öffnen. Entnehmen Sie die alte Rolle.

2. Legen Sie die neue Druckerpapierrolle wie abgebildet ein. Die Rolle muss von unten abrollen.

3. Rollen Sie ca. 10 cm Papier ab.

4. Schließen Sie den Deckel.



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Technischer Service

Wenn Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen haben oder technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel: +49 24 21 969-0

e-mail: info@mn-net.com

www.mn-net.com