

Mode d'emploi simplifié

Information importante :

Ce mode d'emploi simplifié est fourni avec le réflectomètre URYXXON® Relax. Il ne remplace pas le mode d'emploi détaillé. Pour plus d'informations, notamment sur l'utilisation de l'appareil et le nettoyage/la désinfection, se reporter au mode d'emploi détaillé.

Languettes réactives MACHEREY-NAGEL pour l'URYXXON® Relax

L'URYXXON® Relax est un réflectomètre pour l'analyse d'urine par languettes. Il est destiné à être utilisé pour les tests de diagnostic in vitro (IVD). Son usage est réservé aux professionnels de santé. Chaque résultat positif doit être examiné avec un médecin. Si les symptômes persistent, répéter le test.

Utiliser uniquement des languettes urinaires MACHEREY-NAGEL convenant pour les analyses automatiques.

Tester de l'urine fraîche, collectée depuis moins de 2 heures. L'urine congelée doit être amenée à température ambiante (15 à 30 °C) avant le test.

Lire ce mode d'emploi abrégé avant de réaliser un test.

Suivre scrupuleusement les instructions.

Étape 1 :

S'assurer que le lecteur est branché. Le mettre **SOUS TENSION**. S'assurer que le support de languette est bien propre.


Étape 2 :

Tremper la languette dans l'échantillon d'urine. Veiller à ce que toutes les zones réactives soient imbibées d'échantillon.

Attendre 1 seconde puis sortir la languette du gobelet. Sortir la languette en la passant le long du gobelet pour éliminer l'excédent d'urine.

Étape 3 :

Passer brièvement la languette (env. 1 seconde) sur une serviette en papier absorbant pour éliminer l'excédent d'échantillon.

 Veiller à bien éliminer l'excédent d'urine sur la languette afin d'éviter qu'il pénètre dans l'appareil.

Étape 4 :

Placer la languette sur le support de languette. Les zones réactives doivent être dirigées vers le haut. Placer la languette sur le support jusqu'en butée.

La mesure démarre automatiquement.

Étape 5 :

Lorsque la mesure est terminée, le résultat est imprimé.

Étape 6 :

Éliminer les languettes urinaires usagées avec les déchets de laboratoire. Essuyer le support de languette pour éliminer les résidus d'échantillon.

Nettoyage



1. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une lingette désinfectante.
2. Mettre l'appareil hors tension et sortir le support de languette de l'appareil en tirant.
3. Nettoyer le support de languette avec une lingette désinfectante. Replacer le support dans l'appareil.
4. Pousser le support de languette entièrement sur le rail en métal sans trop forcer.
5. Nettoyer la surface de l'appareil avec une lingette désinfectante une fois par jour. Utiliser des lingettes désinfectantes spéciales.

Pour plus d'informations sur le nettoyage et la maintenance, se reporter au mode d'emploi détaillé.

Contrôle de qualité

Chaque laboratoire doit appliquer sa propre politique de contrôle de la qualité.

Utiliser des contrôles positifs et négatifs pour confirmer la performance des languettes. Les contrôles positifs et négatifs doivent être analysés une fois par jour, chaque fois qu'un nouveau flacon de languettes est entamé, chaque fois qu'un nouveau lot de languettes est utilisé, ainsi que tous les 30 jours afin de vérifier les conditions de conservation.

Remplacement du papier de l'imprimante



1. Appuyer sur le bouton à côté de la fente de sortie du papier pour ouvrir le réceptacle. Sortir le rouleau vide de l'imprimante.
2. Installer le nouveau rouleau dans le bon sens (voir figure) pour permettre un déroulement du papier vers le haut.
3. Dérouler une longueur de papier suffisante et la faire sortir du réceptacle.
4. Fermer le couvercle.



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Support technique

Si après avoir lu le mode d'emploi, vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance technique, contacter

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciennener Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne
Tél. : +49 24 21 969-0
E-mail : info@mn-net.com
www.mn-net.com