


Évaluation digitale des bandelettes

QuantifyGo[®]

L'extension smartphone
pour QUANTOFIX[®]

Trempez.
Scannez.
C'est prêt !

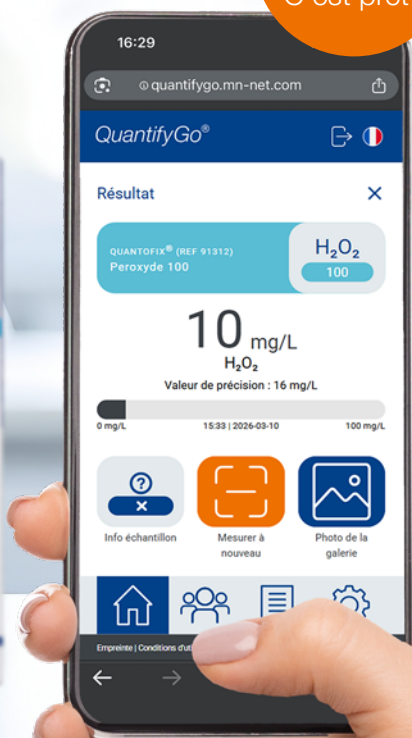

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Simplicité d'utilisation

C'est aussi simple que cela

Avec *QuantifyGo*[®], vous évaluez désormais vos bandelettes tests QUANTOFIX[®] de manière digitale et très simple – directement avec votre smartphone et sans avoir besoin d'installer d'application.



- 1 Scannez le code QR sur l'étui pliant ou à l'intérieur de ce dépliant.



- 2 Appuyez sur le bouton « Scan » dans l'application *QuantifyGo*[®].



- 3 Placez la bandelette réactive trempée dans la solution sur la zone indiquée et prenez-la en photo.




- 4 Votre résultat s'affiche immédiatement sur l'écran.

Testez par vous-même !


Avec *QuantifyGo*[®], vivez l'expérience de l'évaluation digitale de vos bandelettes tests QUANTOFIX[®] en direct.

Placez la bandelette test sur la face correspondante de l'étui pliant ou directement sur la zone de scan à l'intérieur du dépliant !

QUANTOFIX[®]
Peroxyde 25

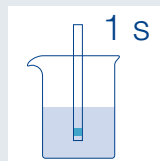


Tremper la bandelette test pendant 1 s dans l'échantillon.

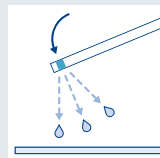

Secouer pour éliminer l'excès de liquide.





Attendre 15 s

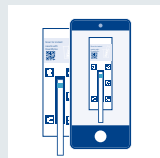


Prendre la photo et la charger dans *QuantifyGo*[®]

QUANTOFIX[®]
Peroxyde 100

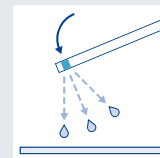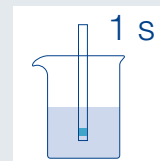

Attendre 5 s

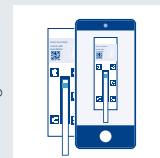

L'analyse live de vos bandelettes !


Valeur de mesure claire –
Objective, sans contraintes et gratuite !

- Scannez le code QR avec votre smartphone
- Placez la bandelette en bas sur l'image de l'étui
- Obtenez immédiatement votre valeur de mesure digitale

Bon à savoir

Inscrivez-vous (optionnel) pour accéder aux fonctions d'équipe, au stockage des données et aux téléchargements.

Scannez le code QR et accédez directement à *QuantifyGo* !

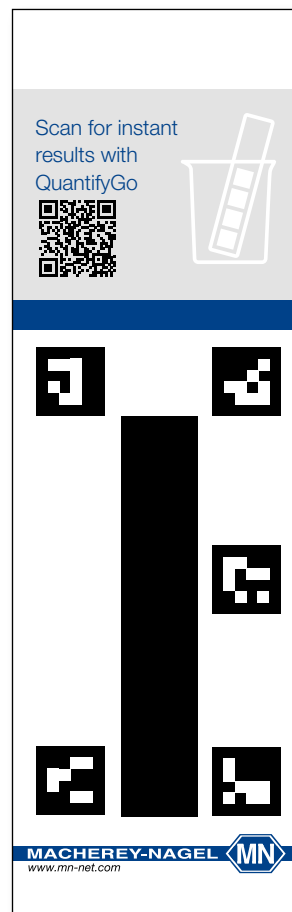

QuantifyGo®

Un système. Tous les échantillons.
Un contrôle total.

La précision plutôt que l'estimation



Valeurs objectives en mg/L.
Fini la comparaison visuelle des échelles de couleurs.

Vos données, votre structure



Associez directement vos résultats au type d'échantillon (ex : lait) ou au site de prélèvement.

Travail d'équipe connecté



Partagez les résultats en temps réel avec votre équipe. Idéal pour les passages de consignes entre équipes.



Documentation en un clic



Filtrez vos mesures et exportez-les directement en rapports PDF ou Excel pour vos audits.

Scan and Go



Aucun téléchargement, aucune validation informatique requise. Scannez simplement le code QR et évaluez dans votre navigateur.

Analyses professionnelles incluses



Pour les utilisateurs de QUANTOFIX®, toutes les fonctions – du scan à l'exportation – sont entièrement gratuites.

QuantifyGo® – Flexible et mobile

- Analyse mobile sur site pour des résultats flexibles sur place.
- Démarrage immédiat sans matériel et sans frais supplémentaires.
- Objectivité digitale pour des valeurs précises sans erreurs de lecture.
- Gestion digitale des données pour un archivage et un export simplifiés.



L'upgrade gratuit pour vos bandelettes tests

Inscrivez-vous pour en savoir plus :

- Enregistrez et téléchargez vos résultats.
- Ajoutez des informations sur vos échantillons.
- Travaillez en équipe et partagez vos données.

Gratuit

Tests digitaux



D'autres paramètres suivront prochainement.

Tout en un coup d'œil

Visitez notre site pour plus d'informations, des tutoriels et le téléchargement gratuit du cadre de scan. Découvrez tous les avantages de *QuantifyGo*® et optimisez votre flux de travail.



Construisez l'avenir avec nous !

Nous développons *QuantifyGo*® pour vous. Quel paramètre souhaitez-vous évaluer de manière digitale prochainement ?

Soumettez votre paramètre souhaité : support@mn-net.com



Votre avis compte !

Aidez-nous à perfectionner l'application. Chaque retour est directement pris en compte dans notre développement.

Vous avez des questions ?

Notre équipe se tient volontiers à votre disposition :

Customer Service Center

Tél. : +49 24 21 969-333

support@mn-net.com



Votre contact :

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11

52355 Düren · Allemagne